

小安心的商品安全訊息快報：『標檢局公布市售「電動吸乳器」商品檢測結果』篇

對寶寶而言，母乳是最完美的食物，為照顧嬰幼兒，許多媽媽常常用手動吸乳器擠到手酸，因此愈來愈多人會購買使用電動吸乳器。目前電動吸乳器非屬應施強制性檢驗商品範圍，為瞭解市售該商品之安全性，經濟部標準檢驗局於臺中地區隨機購樣共 10 件樣品進行檢測，檢測結果所有樣品之安全性檢測項目均符合國家標準之要求；惟「標示檢查」項目均不符合「電器商品標示基準」。

標準檢驗局呼籲業者應確保商品的品質及安全性，並應依規定作商品標示，以保障消費者權益，另該局提醒消費者選購及使用電動吸乳器時，必須注意下列事項：

- 1.選購時請檢視負責廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚，切勿隨意購買來路不明或標示不清楚的商品。
 - 2.檢視是否附有中文使用說明書，並請確實依說明書內容使用，尤其應注意說明書所列之警告、注意事項。
 - 3.建議應在醫師許可及指導下使用電動吸乳器，請勿過度使用或不間斷吸取母乳，避免乳房受傷；以手擠壓乳房無法出乳者，請勿使用電動吸乳器。
 - 4.乾電池型電動吸乳器安裝電池時，應按電池的正負極標示裝置，新舊電池請勿混用；長時間存放不使用時應先取出電池。
 - 5.請勿在浴室或潮濕的地方使用電動吸乳器，以免造成電動吸乳器故障或發生電擊危險。
 - 6.使用中若電動吸乳器不慎落水，應先拔除電源後再撿拾，以避免發生電擊危險。
 - 7.未具防逆流或防溢流裝置之電動吸乳器，使用時應保持奶瓶垂直，以避免因傾斜使母乳流進主機內而造成損壞。
 - 8.電動吸乳器係由許多小零件組成，請勿放置於孩童可輕易取得的地方，以避免孩童不小心將小零件吞入口中。
 - 9.應使用產品隨附的電源供應器，使用完畢後應將電源關閉，當電線或插頭有破損或鬆弛時，切勿使用，以避免發生短路或觸電的危險。
 - 10.清潔保養時，應確實依照使用說明及注意事項，先將電源插頭拔離插座，並於清潔時慎防主機浸泡在水中，並防止水滲入機體內部，以避免電擊危險。
 - 11.隨時注意電動吸乳器狀況，若有故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。
- 其他詳細內容請各位粉絲朋友們參考下列連結網址唷！

<http://www.bsmi.gov.tw/wSite/ct?xItem=46025&ctNode=1510&mp=1>

